



### Sicherheitsvorschriften


- Lesen Sie die Benutzeranleitung (zu finden auf: [www.lopital.de](http://www.lopital.de)) vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Maximale Belastung 150 kg (Amfora/Vienna) & 135 kg (Stylex).
- Achten Sie darauf, dass die Rollen der Amfora / Stylex / Vienna bei einem transfer von und zur Duschliege/ Ankleideliege arretiert sind.




### Bedienung (Amfora/Vienna)



### Bedienung (Stylex)

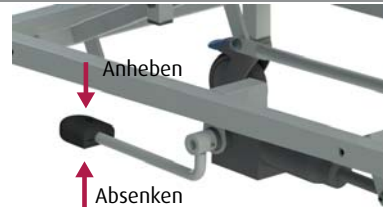


### Rollenblockierung

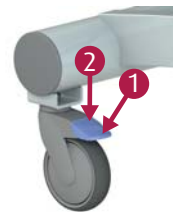

1. Rollenblockierung
2. Entriegeln

### Seitengitter

1. Entriegeln
2. Bewege es Seitengitter zum Angestrebte Tätigkeit

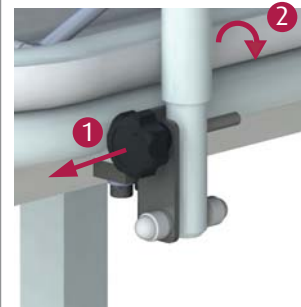

### Wasserableitung (Amfora/Stylex)

Über den Ablaufschlauch wird das Wasser zu einem Abfluss geleitet.



### Reinigung und Wartung

Der Amfora/Stylex/Vienna muss nach jedem Gebrauch mit Wasser und normalen Haushaltsreinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dafür keine Scheuermittel oder andere aggressive Lösungsmittel. Kontrollieren Sie regelmäßig die Rollen auf Haare, Seifenreste und Staub und entfernen Sie diese bei Bedarf. Den vollständige Reinigungsprotokoll finden Sie in der Benutzeranleitung ([www.lopital.de](http://www.lopital.de)).

Nach die Regulation MDR (EU) 2017/745 für medizinische Hilfsmittel muss ein duschliege / Ankleideliege entsprechend der Richtlinien des Produzenten gewartet werden. Den vollständigen Wartungsplan finden Sie in der Benutzeranleitung ([www.lopital.de](http://www.lopital.de)).

Im Falle einer Störung nehmen Sie bitte mit Lopital Händler Kontakt auf.

### Wichtig!

Diese Instrukionskarte darf nicht als Ersatz für die Benutzeranleitung betrachtet werden.

### Benutzeranleitung

Eine umfangreiche Benutzeranleitung finden Sie auf:  
[www.lopital.de](http://www.lopital.de)

