

Sicherheitsvorschriften

- Lesen Sie die Benutzeranleitung (zu finden auf: www.lopital.de) vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Maximale Belastung 135kg
- Achten Sie darauf, dass die Rollen bei einem Transfer von und zum Stuhl arretiert sind.
- Stellen Sie die Füße auf die Fußstütze.
- Fahren und manövrieren Sie mit dem Nemo nur in einer nicht-gekippten Position.
- Während des Transports, den Nemo Stuhl nicht kippen.



Bedienung

Der Nemo ist mit einer Kippfunktion bis maximal 30° nach hinten ausgestattet.

1. Arretieren Sie den Stuhl.
2. Stellen Sie sich schräg hinter den Nemo und halten Sie den Handgriff mit der rechten Hand fest (1).
3. Halten Sie den Rahmen der Kopfstütze mit der linken Hand fest (2).
4. Der Sitzrahmen kann durch Drücken des Bedienungsgriiffs gekippt werden.




Gebrauch

1. Bringen Sie den Stuhl in die gewünschte Position und klappen Sie die Fußstützen nach oben.
2. Arretieren Sie den Stuhl!
3. Klappen die Armlehnen bei Bedarf nach hoch.
4. Unterstützen Sie den Klienten beim Setzen.
5. Schließen Sie die Armlehnen und lassen Sie die Füße des Klienten auf den Fußplatten ruhen.

Das Aufstehen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Rollenblockierung

1. Rollenblockierung
2. Entriegeln

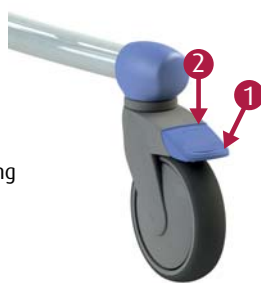


Fußstütze



Beide Fußplatten müssen weggeklappt werden, wenn der Klient sich in den Stuhl setzt. Dazu klappen Sie die Fußplatten (1) hoch oder drehen beide Stützen (2) zur Seite. Achten Sie darauf, dass der Klient beim Transport mit beiden Füßen auf den Fußplatten ruht.

Armlehne

1. Hochklappen

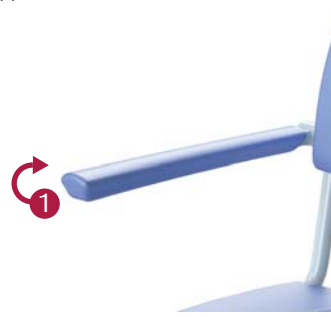

Toilettenfunktion

- Entfernen Sie den Sitzdeckel, bevor der Klient auf dem Stuhl Platznimmt.
- *In Kombination mit einer Toilette:* Der Nemo Stuhl kann über fast jede Toilette gefahren werden.
- *Mit Behälterführung:* Der Nemo Stuhl kann auch als Toilettenstuhl benutzt werden. Schieben Sie dazu den Edelstahl- / Kunststoff-behälter unter den Stuhl.

Reinigung und Wartung

Der Nemo Stuhl muss nach jedem Gebrauch mit Wasser und normalen Haushaltsreinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dafür keine Scheuermittel oder andere aggressive Lösungsmittel. Kontrollieren Sie regelmäßig die Rollen auf Haare, Seifenreste und Staub und entfernen Sie diese bei Bedarf. Den vollständigen Reinigungsprotokoll finden Sie in der Benutzeranleitung (www.lopital.de).

Nach die Regulation MDR (EU) 2017/745 für medizinische Hilfsmittel muss ein Stuhl entsprechend der Richtlinien des Produzenten gewartet werden. Den vollständigen Wartungsplan finden Sie in der Benutzeranleitung (www.lopital.de).

Im Falle einer Störung nehmen Sie bitte mit Lopital Händler Kontakt auf.

Benutzeranleitung

Eine umfangreiche Benutzeranleitung finden Sie auf: www.lopital.de

