


Sicherheitsvorschriften

- Lesen Sie die Benutzeranleitung (zu finden auf: www.lopital.de) vor dem Gebrauch sorgfältig durch. 
- Maximale Belastung 135kg
- Achten Sie darauf, dass die Rollen bei einem Transfer von und zum Stuhl arretiert sind.
- Stellen Sie die Füße auf die Fußstütze.
- Frontverschluss beim Anheben / Absenken schließen und Arme auf den Armlehnen ruhen lassen.
- Fahren und manövrieren Sie den Stuhl nur in einer tiefen Position.

Bedienung

Anheben



Absenken




Gebrauch

1. Bringen Sie den Stuhl in die gewünschte Position und klappen Sie die Fußstützen nach oben.
2. Arretieren Sie den Stuhl!
3. Öffnen Sie die Armlehnen und klappen Sie diese bei Bedarf nach oben.
4. Unterstützen Sie den Klienten beim Setzen.
5. Schließen Sie die Armlehnen und lassen Sie die Füße des Klienten auf den Fußplatten ruhen.

Das Aufstehen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Rollenblockierung

1. Rollenblockierung
2. Entriegeln

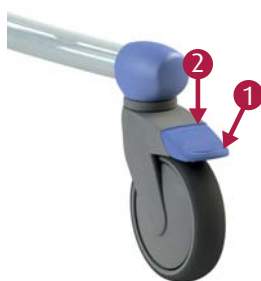

Fußstütze



Beide Fußplatten müssen weggeklappt werden, wenn der Klient sich in den Stuhl setzt. Dazu klappen Sie die Fußplatten (1) hoch oder drehen beide Stützen (2) zur Seite. Achten Sie darauf, dass der Klient beim Transport mit beiden Füßen auf den Fußplatten ruht.

Armlehne mit Frontverschluss

1. Entriegeln
2. Drehen
3. Hochklappen



Toilettenfunktion

- Entfernen Sie den Sitzdeckel, bevor der Klient auf dem Stuhl Platznimmt.
- *In Kombination mit einer Toilette:* Der Flexo Stuhl kann über fast jede Toilette gefahren werden. Bewegen Sie den Stuhl bei Bedarf nach oben oder unten, um die richtige Position zu erreichen.
- *Mit Behälterführung:* Der Flexo Stuhl kann auch als Toilettenstuhl benutzt werden. Schieben Sie dazu den Edelstahl- / Kunststoff-behälter unter den Stuhl.

Reinigung und Wartung

Der Flexo Stuhl muss nach jedem Gebrauch mit Wasser und normalen Haushalts reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dafür keine Scheuermittel oder andere aggressive Lösungsmittel. Kontrollieren Sie regelmäßig die Rollen auf Haare, Seifenreste und Staub und entfernen Sie diese bei Bedarf. Den vollständigen Reinigungsprotokoll finden Sie in der Benutzeranleitung (www.lopital.de).

Nach die Regulation MDR (EU) 2017/745 für medizinische Hilfsmittel muss ein Stuhl entsprechend der Richtlinien des Produzenten gewartet werden. Den vollständigen Wartungsplan finden Sie in der Benutzeranleitung (www.lopital.de).

Im Falle einer Störung nehmen Sie bitte mit Lopital Händler Kontakt auf.

Benutzeranleitung

Eine umfangreiche Benutzeranleitung finden Sie auf: www.lopital.de

