

### Sicherheitsvorschriften

- Lesen Sie die Benutzeranleitung (zu finden auf: [www.lopital.de](http://www.lopital.de)) vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Maximale Belastung 220 kg.
- Achten Sie darauf, dass die Rollen bei einem Transfer von und zum Stuhl arretiert sind.
- Stellen Sie die Füße auf die Fußstütze.
- Frontverschluss beim Anheben / Absenken schließen und Arme auf den Armlehnen ruhen lassen.
- Fahren und manövrieren Sie den Stuhl nur in einer tiefen Position.



### Bedienung

Anheben



Absenken



Absenken



2 Sekunden




### Fußstütze

Beide Fußstützen müssen weggeklappt werden, wenn der Klient sich in den Stuhl setzt. Achten Sie darauf, dass der Klient beim Transport mit beiden Füßen auf den Fußplatten ruht.



### Armlehne

1. Entriegeln.
2. Nach hinten drehen. Schließen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

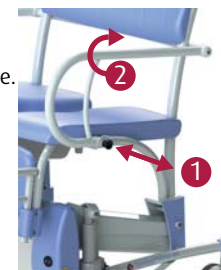


### Gebrauch

1. Aktivieren Sie den Elexo XXL Stuhl indem Sie den Anhebebutton 2 Sekunden gedrückt halten. Achtung: Nach Gebrauch geht der Elexo XXL Stuhl innerhalb von 60 Minuten in den Schlafstand über.
2. Bringen Sie den Stuhl in die gewünschte Position und klappen Sie die Fußstützen nach oben.
3. Arretieren Sie den Stuhl!
4. Öffnen Sie die Armlehnen und klappen Sie diese bei Bedarf nach oben.
5. Unterstützen Sie den Klienten beim Setzen.
6. Schließen Sie die Armlehnen und lassen Sie die Füße des Klienten auf den Fußplatten ruhen.


Das Aufstehen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### Rollenblockierung

1. Rollenblockierung
2. Entriegeln

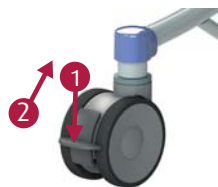

- Rollen blockierung
1. Rollenblockierung
  2. Entriegeln

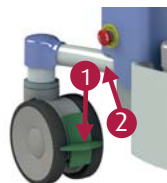


### Abnehmbarer Sitz



### Batterie aufladen

Schließen Sie den Elexo XXL Stuhl nach dem Gebrauch an den Lader an, um die Batterien zu schonen.

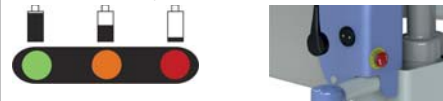

Aus  
Grün  
Blinkt orange

Orange  
Blinkt rot  
Rot

**Während des Ladens funktioniert den Elexo XXL Stuhl nicht.**

Schlafstand  
Stuhl betriebsbereit  
Notabschaltvorrichtung ist aktiviert

Batterie ist halb leer  
Batterie fast leer  
Batterie leer

### Toilettenfunktion

- *In Kombination mit einer Toilette:* Der Elexo XXL Stuhl kann über fast jede Toilette gefahren werden. Bewegen Sie den Stuhl bei Bedarf nach oben oder unten, um die richtige Position zu erreichen.
- *Mit Behälterführung:* Der Elexo XXL Stuhl kann auch als Toilettenstuhl benutzt werden. Schieben Sie dazu den Edelstahl- / Kunststoffbehälter unter den Stuhl.

### Notabsenkung

Bei einem Funktionsausfall kann der Elexo XXL Stuhl mithilfe der Notabsenkung abgesenkt werden.



### Reinigung und Wartung

Der Elexo XXL Stuhl muss nach jedem Gebrauch mit Wasser und normalen Haushaltsreinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dafür keine Scheuermittel oder andere aggressive Lösungsmittel. Kontrollieren Sie regelmäßig die Rollen auf Haare, Seifenreste und Staub und entfernen Sie diese bei Bedarf. Den vollständige Reinigungsprotokoll finden Sie in der Benutzeranleitung ([www.lopital.de](http://www.lopital.de)).

Nach die Regulation MDR (EU) 2017/745 für medizinische Hilfsmittel muss ein Stuhl entsprechend der Richtlinien des Produzenten gewartet werden. Den vollständigen Wartungsplan finden Sie in der Benutzeranleitung ([www.lopital.de](http://www.lopital.de)).

Im Falle einer Störung nehmen Sie bitte mit Lopital Händler Kontakt auf.

**Benutzeranleitung**  
Eine umfangreiche Benutzeranleitung finden Sie auf: [www.lopital.de](http://www.lopital.de)

