


### Sicherheitsvorschriften

- Lesen Sie die Benutzeranleitung (zu finden auf: [www.lopital.de](http://www.lopital.de)) vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Maximale Belastung 227 kg.



### Bedienung

Anheben

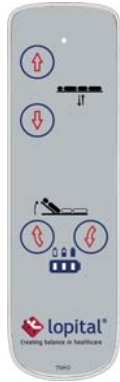

Absenken



Rückenverstellung (deluxe)





Rückenverstellung (deluxe)



### Seitengitter

1. Entriegeln (Zieh den Redhandle)
2. Bewege es Seitengitter zum Angestrebte Tätigkeit

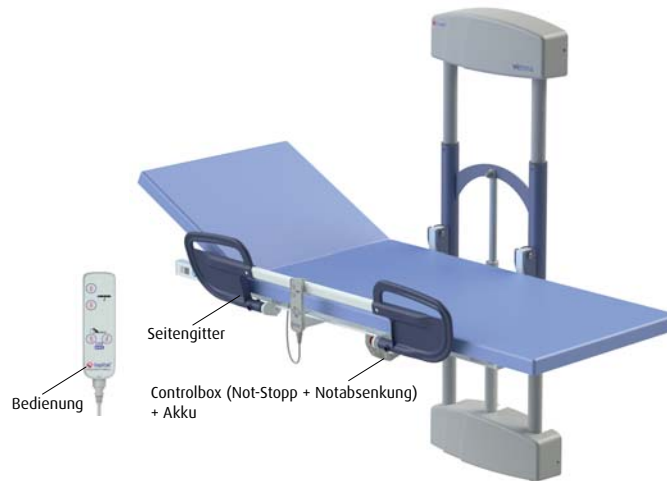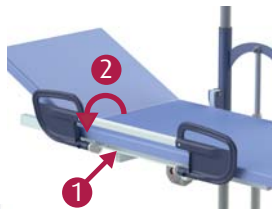

### Klappbare Liegefläche

Die Liegefläche lässt sich ganz einfach platzsparend zusammenklappen.



### Batterie aufladen

Laden Sie den Akku auf, bevor er vollständig entladen ist, um den Akku zu schonen.

An der Handbedienung befindet sich eine Akku-Anzeige



Vollständig geladen



1/3 Fassungsvermögen, empfohlene Aufladung




2/3 Fassungsvermögen



Aufladen erforderlich, Es ertönt ein akustisches Signal

### Not-Stopp + Notabsenkung

1. Betätigen Sie im Notfall den Notstoppschalter und stoppen Sie die Auf- oder Abwärtsbewegung sofort.
2. Wenn die Notabsenkung aktiviert wird bei ein Notfall, die Liege absenkt nach niedrigste Position.

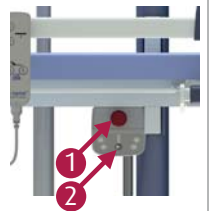

### Reinigung en onderhoud

Der Vienna muss nach jedem Gebrauch mit Wasser und normalen Haushalts reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dafür keine Scheuermittel oder andere aggressive Lösungsmittel. Kontrollieren Sie regelmäßig die Rollen auf Haare, Seifenreste und Staub und entfernen Sie diese bei Bedarf. Den vollständige Reinigungsprotokoll finden Sie in der Benutzeranleitung ([www.lopital.de](http://www.lopital.de)).

Nach die Regulation MDR (EU) 2017/745 für medizinische Hilfsmittel muss ein Ankleideliege entsprechend der Richtlinien des Produzenten gewartet werden. Den vollständigen Wartungsplan finden Sie in der Benutzeranleitung ([www.lopital.de](http://www.lopital.de)).

Im Falle einer Störung nehmen Sie bitte mit Lopital Händler Kontakt auf.

## Instructionskarte

Vienna  
Ankleideliege

### Wichtig!

Diese Instrukionskarte darf nicht als Ersatz für die Benutzeranleitung betrachtet werden.

### Benutzeranleitung

Eine umfangreiche Benutzeranleitung finden Sie auf: [www.lopital.de](http://www.lopital.de)

