

Sicherheitsvorschriften

- Lesen Sie die Benutzeranleitung (zu finden auf: www.lopital.de) vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Maximale Belastung 135kg.
- Achten Sie darauf, dass die Rollen bei einem Transfer von und zum Stuhl arretiert sind.
- Stellen Sie die Füße auf die Fußstütze.
- Frontverschluss beim Anheben / Absenken schließen und Arme auf den Armlehnen ruhen lassen.
- Fahren und manövrieren Sie den Stuhl nur in einer tiefen Position.



Bedienung

Anheben



Absenken



Vorwärts kippen




Rückwärts kippen



Aktivieren



Arretierungstaste

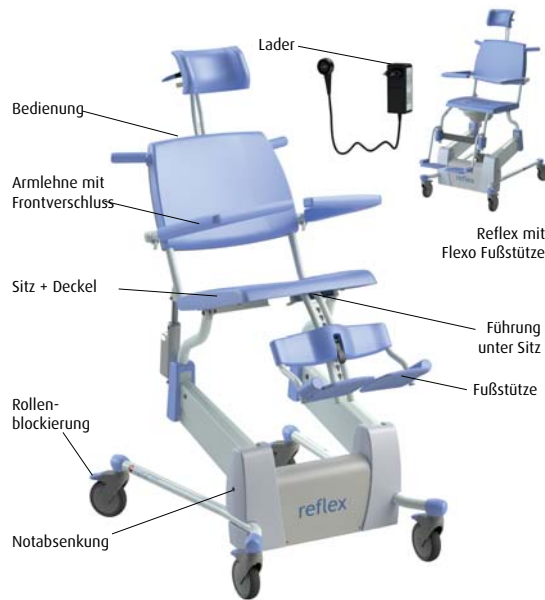

Gebrauch

1. Aktivieren Sie den Reflex Stuhl, indem Sie die 2 Anhebeknöpfe gleichzeitig 2 Sekunden gedrückt halten. Achtung: Nach Gebrauch geht der Reflex Stuhl innerhalb von 60 Minuten in den Schlafstand über.
2. Bringen Sie den Stuhl in die gewünschte Position, auch die Kopf- und Fußstütze (oder klappen Sie diese nach oben).
3. Arretieren Sie den Stuhl!
4. Öffnen Sie die Armlehnen und klappen Sie diese bei Bedarf nach oben.
5. Unterstützen Sie den Klienten beim Setzen.
6. Schließen Sie die Armlehnen und lassen Sie die Füße des Klienten auf den Fußplatten ruhen.


Das Aufstehen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Mithilfe des Arretierungstaste werden alle Funktionen des Reflex Stuhls ausgeschaltet. Der Stuhl muss resettet werden. Dazu halten Sie beide Anhebeknöpfe 4 Sekunden lang gedrückt.

Rollenblockierung



1. Rollenblockierung
2. Entriegeln

Fußstütze

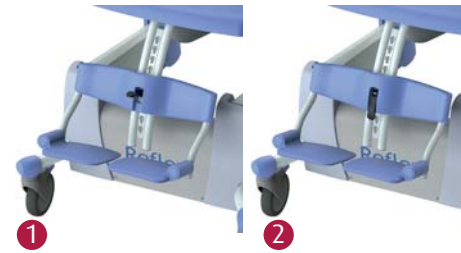


1. Entriegeln.
2. Komplette Fußstütze abnehmen.
3. Gewünschte Position wählen.
4. Einhängen und arretieren.

Achten Sie darauf, dass der Klient beim Transport mit beiden Füßen auf den Fußplatten ruht.

Armlehne mit Frontverschluss

1. Entriegeln
2. Drehen
3. Hochklappen

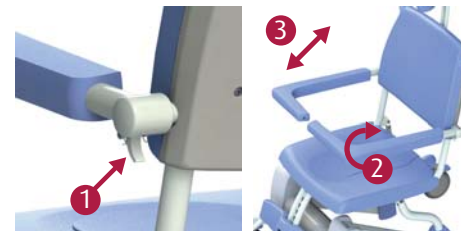

Batterie aufladen

Schließen Sie den Reflex Stuhl nach dem Gebrauch an den Lader an, um die Batterien zu schonen.



Aus
Grün
Blinkt rot
Rot

Schlafstand
Stuhl betriebsbereit
Batterie fast leer
Batterie leer

Während des Ladens funktioniert den Reflex Stuhl nicht.

Wichtig!

Diese Instruktionkarte darf nicht als Ersatz für die Benutzeranleitung betrachtet werden.

Toilettenfunktion

- Entfernen Sie den Sitzdeckel, bevor der Klient auf dem Stuhl Platznimmt.
- In Kombination mit einer Toilette: Der Reflex Stuhl kann über fast jede Toilette gefahren werden. Bewegen Sie den Stuhl bei Bedarf nach oben oder unten, um die richtige Position zu erreichen.
- Mit Behälterführung: Der Reflex Stuhl kann auch als Toilettenstuhl benutzt werden. Schieben Sie dazu den Edelstahl- / Kunststoff-behälter unter den Stuhl.

Notabsenkung

Bei einem Funktionsausfall kann der Reflex Stuhl mithilfe der Notabsenkung abgesenkt werden.



Reinigung und Wartung

Der Reflex Stuhl muss nach jedem Gebrauch mit Wasser und normalen Haushaltsreinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dafür keine Scheuermittel oder andere aggressive Lösungsmittel. Kontrollieren Sie regelmäßig die Rollen auf Haare, Seifenreste und Staub und entfernen Sie diese bei Bedarf. Den vollständige Reinigungsprotokoll finden Sie in der Benutzeranleitung (www.lopital.de).

Nach die Regulation MDR (EU) 2017/745 für medizinische Hilfsmittel muss ein Stuhl entsprechend der Richtlinien des Produzenten gewartet werden. Den vollständigen Wartungsplan finden Sie in der Benutzeranleitung (www.lopital.de).

Im Falle einer Störung nehmen Sie bitte mit Lopital Händler Kontakt auf.

Benutzeranleitung

Eine umfangreiche Benutzeranleitung finden Sie auf: www.lopital.de

