




Gebrauch

1. Rollen Sie den Lotus/Lotus compact/Lotus XL zu der Klient und drehen Sie die Sitzteile weg.
2. Spreizen Sie gegebenenfalls die Beine des Lotus/Lotus compact/Lotus XL und rollen Sie ihn möglichst nahe an die Klient.
3. Arretieren Sie den Lotus/Lotus compact/Lotus XL.
4. Bitten Sie die Klient aufzustehen und drehen Sie den Sitz zurück.
5. Die Klient kann sich jetzt setzen.

Das Aufstehen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Rollenblockierung

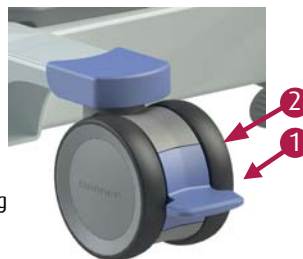

1. Rollenblockierung
2. Entriegeln

Beinspreizung




Der Lotus/Lotus compact/Lotus XL ist mit einer mechanischen Beinspreizung ausgerüstet. Durch Treten auf eines der Pedale, bewegen sich die Beine nach innen oder außen (abhängig von dem gewählten Pedal).

Wegdrehbare Sitzteile



Der Lotus/Lotus compact/Lotus XL ist mit 2 komfortablen, wegdrehbaren Sitzteilen ausgestattet.

Der Lotus/Lotus Compact hat bei abgewandten Sitzteilen einen Einstieg von 44 cm. Der Lotus XL hat einen Einstieg von sage und schreibe 52 cm.

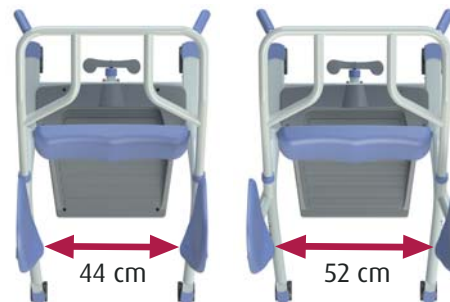

Verstellbare Beinstütze

Durch leichtes Lösen der Nüsse, mit denen die Beinstütze befestigt ist, kann die Beinstütze nach oben oder unten verstellt werden.



Reinigung und Wartung

Der Lotus/Lotus compact/Lotus XL muss nach jedem Gebrauch mit Wasser und normalen Haushaltsreinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dafür keine Scheuermittel oder andere aggressive Lösungsmittel. Kontrollieren Sie regelmäßig die Rollen auf Haare, Seifenreste und Staub und entfernen Sie diese bei Bedarf. Den vollständigen Reinigungsprotokoll finden Sie in der Benutzeranleitung (www.lopital.de).

Nach die Regulation MDR (EU) 2017/745 für medizinische Hilfsmittel muss der Lotus entsprechend der Richtlinien des Produzenten gewartet werden. Den vollständigen Wartungsplan finden Sie in der Benutzeranleitung (www.lopital.de).

Im Falle einer Störung nehmen Sie bitte mit Lopital Händler Kontakt auf.

Benutzeranleitung

Eine umfangreiche Benutzeranleitung finden Sie auf: www.lopital.de



Sicherheitsvorschriften

- Lesen Sie die Benutzeranleitung (zu finden auf: www.lopital.de) vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Maximale Belastung 200 kg (Lotus/Lotus compact) oder 227 kg (Lotus XL).
- Achten Sie darauf, dass die Rollen bei einem Transfer von und zum Lotus/Lotus compact/Lotus XL arretiert sind.



Wichtig!

Diese Instruktionkarte darf nicht als Ersatz für die Benutzeranleitung betrachtet werden.